

APPAREIL DE CAVITATION + RADIO FRÉQUENCE VISAGE ET CORPS+ VACUUM RF Mode d'emploi



Cher client, nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Pour pouvoir vous garantir un meilleur rendement et pour votre sécurité, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Veuillez conserver ce mode d'emploi comme référence pour le futur.

Avertissement

Cher utilisateur, Nous vous remercions d'utiliser nos produits. Pour une bonne utilisation, nous vous suggérons de bien suivre les instructions suivantes:

- Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour de futures consultations.
- Veuillez suivre ces instructions pour monter et utiliser l'appareil correctement.
- Veuillez à ne pas retirer ou changer les accessoires de l'appareil.
- Le démontage et l'ouverture de l'appareil ne peuvent être effectués que par des personnes autorisées.
- L'entretien de l'appareil ne peut être réalisé que par un technicien professionnel qualifié.
- Veuillez prendre contact avec nous en cas de problème pendant l'opération.

Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Veuillez à ne pas l'utiliser pour le traitement de maladies.

Sommaire

Composants

Installation

Protocole de cavitation de 40KHz

Nombre de séances et précautions d'emploi pour la cavitation de 40KHz

Protocole pour RF bipolaire vacuum, traitement corporel

Protocole pour RF corps

Protocole RF tripolaire et quadripolaire

Nombre de séances et précautions d'emploi pour l'utilisation de RF

Contre-indications

Divers

Entretien vacuum

Consentement éclairé cavitation / RF

Fiche client

Composants

1. Sonde de RF tripolaire
2. Sonde de RF quadripolaire
3. Sonde de RF à six pôles
4. Sonde de RF bipolaire vacuum
5. Sonde de cavitation de 40Khz



1



2



3




4



5

Installation

1. Connectez les accessoires dans les connecteurs correspondants de l'appareil
2. Introduisez la câble d'alimentation électrique dans le connecteur allumez l'interrupteur général pour accéder à l'interface de démarrage

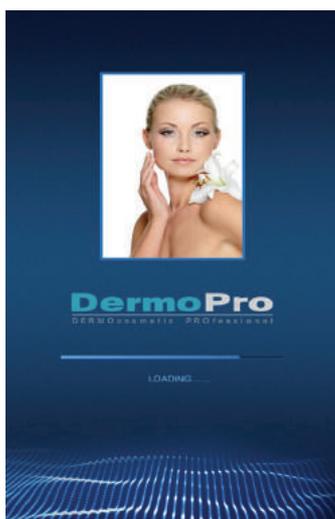

3. Cliquez sur 40K (cavitation)

Le mode A, B... vous permet de choisir une cavitation continue ou pulsée (personnes sensibles au bourdonnement de la cavitation).



Indications

Cavitation :

- Bras (partie interne)
- Abdomen et côtés
- Culotte de cheval et jambes (partie interne).
- Fesses

Radiofréquence :

- Visage, cou et décolleté
- Bras (partie interne)
- Abdomen et côtés
- Culotte de cheval et jambes (partie interne)

Protocole de cavitation de 40KHz

Le système de cavitation utilise des ultrasons de 40KHz pour générer une intense vibration qui provoque une explosion interne dans le tissu graisseux afin de libérer et rejeter les adipocytes.

Ainsi, il décompose de manière efficace la graisse profonde tout en réduisant la quantité d'adipocytes et leur taille. De plus, il stimule le flux des tissus en améliorant le drainage à travers le système lymphatique.

1. Nettoyez et appliquez le gel lipolytique Dermocav sur les zones à traiter (par exemple : abdomen, anches, cuisse). La quantité dépend de l'amplitude de la zone à traiter.
2. La fonction par défaut du système est le traitement de cavitation
3. Cliquez sur  pour déterminer le temps de travail

Il est recommandé de travailler de 30 à 40 min (exemple : abdomen 30 minutes au total, culotte de cheval 20 minutes par jambe, 40 minutes au total)

4. Cliquez sur  pour régler l'intensité de sortie. Dépendra de la quantité de graisse accumulée. Puis sur marche pour commencer le traitement



5. Le professionnel doit travailler avec la sonde de cavitation sur des zones telles que l'abdomen, les côtés, la culotte de cheval, les cuisses, les bras et les fesses. Travaillez sur la peau du client en réalisant des mouvements circulaires de pincement c'est-à-dire que vous devez pousser le tissu graisseux vers la sonde.



6. Quand le temps fixé se termine, l'appareil s'éteindra automatiquement. Veuillez cliquer sur l'écran.
7. Nettoyez les restes de gel de la peau et de la sonde avec un chiffon doux.

Nombre de séances :

Un traitement de cavitation dure 6 séances et vous pouvez réaliser 2 traitements de suite, c'est-à-dire 12 séances au total (peu importe la zone à traiter).

Pour recommencer un traitement, il faut attendre un minimum d'un mois et demi.

Précautions d'emploi pour la cavitation de 40KHz

1. Le professionnel doit utiliser des gants pendant la manipulation.
2. Appliquez suffisamment de gel sur la zone à traiter. Ne laissez pas la sonde immobile sur une zone du corps.
3. Temps total de traitement par jour : de 30 à 40 min selon la zone.
4. La sonde de cavitation de 40KHz ne peut être utilisée que sur le corps, veuillez éviter le visage. En cas de réactions sur la peau, veuillez baisser le niveau d'intensité.
5. Ne pas appliquer sur le dos. Évitez le traitement sur les zones osseuses.
6. Évitez également la zone de l'utérus chez les femmes. De plus, vous devez éviter la zone abdominale pendant la menstruation.

Protocole pour RF vacuum bipolaire, traitement corps

1. Cliquez sur « Vacum (Bipolar RF) »
2. Réglez le temps de traitement : de 20 à 30 minutes (D), puisque vous n'obtiendrez pas de meilleurs résultats au-dessus de 30 minutes.
3. Cliquez sur A pour régler la force d'aspiration, sur B pour définir l'intervalle de temps entre chaque aspiration et sur C pour la puissance qui dépendra de la sensibilité cutanée. Utilisez toujours le thermomètre pour vérifier la température cutanée.

Il faut commencer par de basses intensités puis augmenter en fonction de la cliente (nous recommandons de ne pas travailler à la puissance maximum).

4. Cliquez sur marche pour commencer le traitement et sur stop pour l'interrompre.
5. Appliquez le gel DermoRef à 15% de DMAE sur la zone à traiter. Commencez à travailler de l'intérieur vers l'extérieur de manière linéaire en insistant sur les zones les plus marquées.

PS. En plus des réglages décrit ci-dessus, votre appareil est doté d'un potentiomètre qui vous permet de régler la force d'aspiration directement au niveau du compresseur.





Protocole pour RF corps

Suivez le même protocole que pour la RF bipolaire.

Protocole RF tripolaire et quadripolaire

1. Cliquez sur « RF Tripolaire» ou «RF Quadripolaire»



2. Réglez le temps de traitement



3. Cliquez sur



pour déterminer la puissance qui dépendra de la sensibilité

cutanée.

Utilisez toujours le thermomètre pour vérifier la température cutanée.

Il faut commencer par de basses intensités puis augmenter en fonction de la cliente (nous recommandons de ne pas travailler à la puissance maximum).

4. Cliquez sur marche pour commencer le traitement et sur stop pour l'interrompre.

5. Appliquez le gel DermoRef à 15% de DMAE sur le visage et le cou (en évitant la zone de la thyroïde). Commencez à travailler sur le cou jusqu'au front de l'intérieur vers l'extérieur de manière linéaire en insistant sur les zones les plus marquées (par exemple : le contour des yeux et de la bouche).



6. Quand le temps fixé se termine, l'appareil s'éteindra automatiquement.
7. Nettoyez les restes de gel de la peau et de la sonde avec un chiffon doux.

REMARQUE : Évitez que le gel entre en contact avec les yeux.

Nous recommandons l'utilisation d'un thermomètre infrarouge.

Séances :

Un traitement de radiofréquence comprend jusqu'à 20 séances sachant qu'on peut réaliser une à deux séances par semaine selon le type de peau.

Exemple : pour les peaux plus matures, il convient de réaliser 2 séances par semaine pour les 2 premières semaines puis une par semaine pour le reste de séances.

Pour recommencer un traitement, il faut laisser passer un mois et demi minimum.

Précautions d'emploi pour l'utilisation de RF :

1. Le professionnel doit utiliser des gants pendant la manipulation de l'appareil.
2. Ni le professionnel ni le client ne doivent porter de bijoux ou d'accessoires.
3. La sonde doit être en contact avec la peau. .
4. Ne laissez pas la sonde de RF immobile sur une partie du corps mais veillez à ce qu'elle soit toujours en mouvement.
5. La peau du contour de l'oeil et du front est très fine c'est pourquoi l'intensité de sortie de RF doit être relativement basse.

REMARQUE : Le facteur le plus important pour déterminer la réponse physiologique à la chaleur est le niveau d'élévation de la température tissulaire qui doit être de 39-40°C au niveau facial (à partir de 40°C, le collagène est détruit) et de 40-41°C au niveau corporel (le collagène de notre corps est plus fort que celui de notre visage).

IMPORTANT :

Si au cours du traitement, la cliente ressent des sortes de crampes, cela peut être dû à plusieurs raisons :

- La peau n'a pas été bien nettoyée
- La peau est mal vascularisée (elle ne laisse pas passer le courant).
- La peau ne supporte plus de chaleur.

Contre-indications :

1. Personnes malades du coeur, à la pression artérielle élevée ou portant un pacemaker.
2. Personnes souffrant d'inflammation aiguë, d'asthme, de thrombose, de problèmes de thyroïdes ou de cancer.
3. Personnes souffrant de maladies hémorragiques.
4. Femmes enceintes, en période d'allaitement ou de menstruation.
5. Personnes portant une prothèse ou une orthèse en plastique.
6. Personnes portant des prothèses métalliques, y compris les prothèses dentaires.
7. Personnes souffrant d'inflammation de la peau ou d'œdème.
8. Personnes souffrant de troubles du système immunologique.
9. Personnes peu sensibles ou insensibles à la chaleur.
10. Pour la cavitation, personnes souffrant de cholestérol.

DIVERS

Dans votre colis vous trouverez :

1/ Des joints de **remplacement**.

- pour le réservoir transparent destiné à recevoir les excédents de gel lors du soin vacuum. Ce réservoir est à placé avant utilisation du soin vacuum (A).

- pour la prise vacuum branché à l'arrière de l'appareil

2/ Des fusibles de **remplacement**.

Comme pour les joints, à garder pour l'avenir. En cas de surtension dans votre immeuble, votre appareil est protégé par un fusible situé au dessus de la prise d'alimentation électrique (B).



ENTRETIEN VACUUM

Votre appareil est doté d'un potentiomètre permettant un réglage du compresseur du vacuum, en plus des réglages possible depuis l'écran.

ENTRETIEN VACUUM

L'ajustement de l'aspiration du vacuum se réalise depuis l'écran comme vu plus haut. Vous pouvez aussi accéder au réglage du compresseur par le biais d'une molette en aluminium à l'arrière de l'appareil.

Malgré le réservoir filtre (A), il est possible dans le temps que votre vacuum aspire de moins en moins. Dans ce cas, il suffira de retirer la pastille plastique dans la tête vacuum à l'aide d'un petit tournevis, de la nettoyer et la repositionner (C).



Vous pouvez aussi vérifier la présence éventuelle d'excédent de gel en ouvrant la pièce à main vacuum (D).

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ CAVITATION

Nom et prénom :

La cavitation est une technique non invasive pour sculpter le corps qui permet de réduire le volume, la cellulite

et les dépôts de graisse localisée au niveau de :

- Abdomen et côtés
- Culotte de cheval et face interne des cuisses et genoux
- Bras
- Dos

Le nombre de séances est variable selon le client et la zone à traiter, de 6 à 12 séances.

Contre-indications :

- Allergiques à la céramique ou autres composants.
- Femmes enceintes ou en période d'allaitement.
- Présence de néoplasies (tumeurs).
- Maladie infecto-contagieuse.
- Maladie auto-immune.
- Prévenir si vous portez un implant métallique.
- Cholestérol.
- Si vous souffrez de phlébite (inflammation des veines).
- Si vous portez un pacemaker ou électrode implanté.
- Graves problèmes de circulation ou d'hypertension.
- Infections de la peau.
- Applications sur enfants ou adolescents.

Recommandations :

- Il convient d'avoir une alimentation équilibrée.
- Drainage lymphatique manuel ou préssothérapie.
- Il est très important de boire beaucoup d'eau pendant tout le traitement (de 1.5 à 2 litres par jour).

J'ai été informé sur ce traitement et ses contre-indications, je suis majeur, je signe et donne mon consentement

DATE : SIGNATURE:

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ RF

Nom et prénom :

La radiofréquence est un traitement aussi bien facial que corporel qui génère une profonde chaleur accompagnée d'une bio-stimulation au niveau cellulaire (micro-circulation sanguine, réabsorption de la rétention d'eau, effets antalgiques..). Le traitement peut comprendre de 6 à 10 séances et a une durée approximative de 20 à 40 min, avec une à deux séances par semaine.

Contre-indications :

- Cancer.
- Grossesse et allaitement.
- Altérations de la coagulation.
- Maladies du tissu connectif et maladies neuromusculaires.
- Implants récents de collagène.
- Pacemaker ou prothèses métalliques sur la zone à traiter.
- Cardiopathies.
- Infections ou altérations sur la zone à traiter.
- État fébrile.
- Diabète.
- Épilepsie.

Possibles réactions après le traitement :

Légères rougeurs, oedème ou érythème selon la personne, qui disparaîtront rapidement.
Dans certains cas rares, de légères ecchymoses peuvent apparaître sur des zones de fragilité cutanée.

Recommandations :

- Boire beaucoup d'eau pour hydrater la peau.
- Utiliser des crèmes conseillées par le professionnel.
- Faire de l'exercice de façon modérée.
- Avoir une alimentation équilibrée.

J'ai été informé sur ce traitement et ses contre-indications, je suis majeur, je signe et donne mon consentement

DATE : SIGNATURE:

FICHE CLIENT

Nom et prénom :

Date de naissance: Sexe: Tel:

Type de peau:

DATE : SIGNATURE:

Programme de soins		
Séance	Date	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		



DermaPro
DERMOCosmetic PROFESSIONAL

Distribué par DermaPro 62, rue de Paris - 59200 TOURCOING - Tel. 03 20 24 24 26
MADE IN PRC